

Gut zu wissen!

Wenn Sie die Haut mit einer antiseptischen Seife reinigen, spülen Sie diese gründlich ab und trocknen Sie die Haut vor dem Anlegen des Verbands. Durch Seifenreste auf der Haut, kann die optimale Haftung beeinträchtigt werden.

Achten Sie bei der Applikation des Verbands darauf, diesen nicht zu überdehnen. Vermeiden Sie zudem, wenn möglich, eine Faltenbildung am Verband.



Bestellinformationen Mepilex® Border Post-Op

Art. Nr.	Grösse (cm)	Stk./ Packung	Stk./ Karton
496100	6 x 8	10	100
496200	9 x 10	10	100
496300	10 x 15	10	100
496400	10 x 20	10	30
496450	10 x 25	10	80
496600	10 x 30	10	40
496650	10 x 35	5	50

Proving it every day

Mölnlycke® liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckulzera. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

Referenzen: 1. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 2. Van Overschelde P, et al. Undisturbed wound healing: a single centre retrospective study investigating patient reported outcomes and clinical validity of extended dressing wear time for incisional healing following orthopaedic surgery, the ARCTIS study. Journal of Wound Care, 2024. 3. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH
Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland, Tel +49 211 920 88 0
Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich, Tel +43 1 2788542
Brandstraße 24, 8952 Schlieren, Schweiz, Tel +41 44 744 54 00
Der Name Mölnlycke® und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2024 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

Einfach nur schauen. Nicht anfassen.

Applikationsleitfaden



Mepilex® Border Post-Op
Ungestörte postoperative Wundheilung



Beginnen Sie immer mit einer sorgfältigen Reinigung der Wunde und der umgebenden Haut. Entfernen Sie jegliche Rückstände, z.B. Wundbeläge, Fettgewebe und Reste von Wundspülösungen. Achten Sie darauf, dass die Haut vor der Anlage des Verbandes vollständig trocken ist.

Leitfaden für den Verbandwechsel Mepilex® Border Post-Op

1.



Nehmen Sie den Verband aus der sterilen Verpackung.

2.



Entfernen Sie die Schutzfolie ganz oder teilweise und applizieren Sie den Verband auf der Haut.

3.



Beginnend mit der Lasche, können Sie die verbleibende Schutzfolie am Rand der Wundauflage entfernen.

4.



Streichen Sie den Verband auf der wundumgebenden Haut glatt, um eine gute Abdichtung und eine bestmögliche Haftung zu erzielen.

Wenn kein Verbandwechsel erforderlich ist

Mepilex® Border Post-Op wurde entwickelt, um Blut **sehr effektiv zu absorbieren** und vom Inzisionsbereich abzu-
leiten.¹ Das ermöglicht eine **Tragezeit von bis zu 14 Tagen.**²

Wenn auf der Wundauflage Verfärbungen durch Blut erkennbar sind, ist dies noch kein Grund für einen Verbandwechsel. Lassen Sie den Verband auf der Wunde und **wechseln Sie die Wundauflage erst, wenn dies notwendig ist.**

**Einfach nur schauen.
Nicht anfassen.**

Verband nicht wechseln!



Verband wechseln!

