

Leitfaden Verbandwechsel

Ihre Pflegefachkraft hat Mextra® superabsorbierende Wundauflage für Ihre Wunde ausgewählt

Applikation Mextra® Superabsorbent:

1. Waschen Sie Ihre Hände 20 Sekunden lang mit Seife und warmem Wasser.
2. Reinigen Sie die Wunde nach Anweisung des Pflegefachpersonals.
3. Applizieren Sie Mextra Superabsorbent, indem Sie die weisse Seite des Verbandes auf die Wunde legen. **Sie sollten während der Anwendung die blaue Seite sehen können.**



4. Die Wundauflage sollte die trockene umgebende Haut überlappen.
5. Fixieren Sie Mextra Superabsorbent, z.B. mit Tubifast.



Was Sie beachten sollten:

- ✓ Schneiden Sie Mextra Superabsorbent nicht zu.
- ✓ Mextra Superabsorbent ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, keine Wiederverwendung.



Wann Sie Ihren Verband wechseln sollten:

Ratschlag Ihrer Pflegefachkraft:

Für weitere Hilfe und Beratung wenden Sie sich bitte an Ihr Pflegefachpersonal:

Scannen Sie den QR Code oder benutzen Sie folgenden Link zum Applikationsvideo:



www.molnlycke.com/mextra-application

Mextra Superabsorbent Wundauflage sollte von medizinischem Fachpersonal gehandhabt und angelegt werden. Wenn jedoch kein medizinisches Fachpersonal zur Verfügung steht, kann ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel vornehmen. Mölnlycke Health Care übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Anwendung des Verbandes durch solche Personen. Wenn Mextra Superabsorbent von einer Person angewendet wird, die kein medizinisches Fachpersonal ist, geschieht dies ausschliesslich auf eigenes Risiko des Benutzers.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke und Mextra sind weltweit für ein oder mehrere Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe registriert. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. CH-HQIM001626_b


Mölnlycke®